

Siguran i pouzdan sustav za određivanje stope sedimentacije eritrocita



PIPETIRANJE

Pažljivo promiješajte pripremljeni uzorak krvi. Otvorite epruvetu s uzorkom za testiranje te u nju umetnite pipetu VACUPETA.

Gurnite pipetu do dna epruvete s uzorkom za testiranje; stupac krvi automatski će se podići do svoje nulte pozicije, važne za uspješno mjerenje.

Po završetku pipetiranja, sustav VACUPETA u potpunosti se zatvori, a bilo kakva infekcija potpuno je nemoguća.

STANDARDIZIRANI POSTUPAK MJERENJA

U stalak umetnite pipetu unutar epruvete s uzorkom za testiranje. Postavite stalak s epruvetama s uzorcima za testiranje tako da omogućava pipetama da stoje vertikalno. Oblik pipete i priprema uzorka u epruveti osigurava potpunu kompatibilnost s Westergreen postupkom.

Očitajte rezultate testiranja nakon razdoblja od jednog sata.

Po završetku testiranja ne rastavljajte sustav; neškodljivo uklonite pipetu zajedno s epruvetom s uzorkom za testiranje u skladu s laboratorijskim propisima.

PRIBOR

Za ručno mjerenje upotrebljavajte građiranu pipetu VACUPETA 3.02.1.7 i stalak za pipete 3.02.9.1.



Postavite sustav u skladu s uputama i ne zaboravite: očitavanje rezultata se mora izvesti točno 1 sat nakon što je pipeta postavljena u stalak.

Automatski ESR analizator SEDIKO M10 koji koristi VACUPETA-SEDIKO pipete 3.03.1.7 također je dostupan. Za najbolje rezultate preporučujemo upotrebu VACUTUBE ESR 4.03.1.3 vakumskih epruveta za uzimanje krvi.



Vakumske epruvete s uzorkom za testiranje i propisana količina natrijevog citrata osiguravaju pravilan omjer miješanja, a time i precizno mjerenje.

Minimalna nelagoda za pacijenta:

potrebno je samo 1.6 ml krvi!

Uzimanje krvi izvodi se na potpuno jednak način kao i za druge pretrage krvi.

ref

Stavka 1 3.02.1.7

3.03.1.7

3.02.9.1

3.03.9.1

4.03.1.3

proizvod

VACUPETA građirana pipeta

VACUPETA-SEDIKO negrađirana pipeta

VACUPETA stalak

SEDIKO M10 automatski ESR analizator

VACUTUBE ESR 4NC

napomena

za ručnu upotrebu

za automatski ESR analizator

za ručnu upotrebu

dostupno je više informacija

odgovarajuća vakumska epruveta za uzimanje krvi